



POMEMBNE INFORMACIJE! NAVODILO SHARNITE ZA NADALJNO UPORABO!

Pred uporabo naprave pozorno preberite navodilo za uporabo (predvsem navodila za varnost) in shranite navodilo za nadaljnjo uporabo. V primeru, da napravo posredujete drugi osebi, je zelo pomembno, da posredujete tudi navodilo za uporabo.

Razlaga simbolov



To navodilo za uporabo sodi k temu izdelku. Vsebuje pomembne informacije pred začetkom uporabe in o delovanju izdelka. Preberite navodilo v celoti; v nasprotnem primeru lahko izdelek poškodujete.



OPOZORILO

Tovrstne opombe upoštevajte, da preprečite poškodbe uporabnika.



PREVIDNO

Tovrstne opombe upoštevajte, da preprečite poškodbe izdelka.



OPOMBA

Tovrstne opombe vam nudijo uporabne informacije o namestitvi in delovanju izdelka.



Varovanje II. kategorije



Številka LOT



Proizvajalec



Izdelka ne prebadajte!



Izdelka ne uporabljajte, če je prepognjen!



Izdelek uporabljajte le v zaprtih prostorih!



Ne perite! Preveko lahko perete pri največ 30°C



Ne belite!



Ne sušite v sušilnem stroju!



Ne likajte!



Ne čistite kemično!

1 NAVODILA ZA VARNO UPORABO



- Pred vklopom izdelka se prepričajte, če je vaše električno omrežje kompatibilno z zahtevanim.
- Izdelek redno pregledujte, da ni poškodovan. Če se pojavijo znaki okvare, se obrnite na prodajalca.
- Izdelek ne sme biti prižgan z uporabo stoparice.
- Izdelka ne uporabljajte prepognjenega ali zgubanega.
- Izdelek uporabljajte le v namene, opisane v tem navodilu za uporabo.
- Izdelka naj ne uporabljajo otroci ali prizadete osebe ali osebe, neobčutljive na toploto.
- Izdelek ni namenjena uporabi psihično ali fizično prizadetim ljudem, osebam s senzoričnimi težavami ali osebam z nezadostnimi izkušnjami ali pomanjkljivim znanjem. Takšne osebe lahko uporabljajo izdelek le v primeru nadzora za njih odgovorne osebe.
- Ta izdelek ni igrača.
- Med uporabo kontrolno stikalo ali kabel ne smeta biti pokrita.
- Izdelka ne smete uporabljati na živalih.
- V izdelek ne nameščajte varnostnih zaponk ali drugih ostrih predmetov.
- Izdelka ne puščajte vklopljenega nenadzorovanega.
- Pazite, da med uporabo ne boste zaspali.
- Med uporabo ne uporabljajte čevljev ali copat.
- Predolga uporaba izdelka pri visoki temperaturi lahko povzroči opekline.
- Izdelka ne uporabljajte v postelji.
- Izdelek je namenjen izključno domači uporabi.
- Izdelek ni namenjen za bolnišnično in komercialno uporabo.
- Ne uporabljajte izdelka, če je le ta padel v vodo – v tem primeru jo nemudoma izklopite iz električnega omrežja.
- Izdelka ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali, če je le ta vlažna. Pred uporabo počakajte, da se popolnoma posuši.
- Kontrolnega stikala ali kabla nikoli ne izpostavljajte vlagi.
- Električni kabel shranjujte stran od vročih površin.
- Izdelka nikoli ne vlecite za električni kabel in pazite, da le ta ni zvit.
- V primeru, da izdelek ne deluje, je ne skušajte popraviti sami. Vrnite jo prodajalcu.
- Pred shranjevanjem naj bo Izdelek popolnoma suh.
- V primeru kakršnihkoli dvomov zaradi zdravja, se pred uporabo posvetite s svojim zdravnikom.
- Če med uporabo čutite bolečine ali se počutite kakorkoli neprijetno, nemudoma prenehajte z uporabo.
- Poškodovanega kabla ni mogoče zamenjati. V tem primeru je potrebno zavreči celoten izdelek.
- Izdelka ne uporabljajte, če imate otečene, vnete ali poškodovane.

2 DELOVANJE

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in vam ob nakupu čestitamo!

Kupili ste grelnik nog FWS, kvalitetni izdelek podjetja **MEDISANA**.

Za zagotovitev le najboljših rezultatov in dolgotrajno zadovoljstvo ob uporabi **MEDISANINEGA** grelnika za noge, vam priporočamo, da previdno preberete sledeča navodila o delovanju in vzdrževanju izdelka.

2.1 Vsebina paketa

Najprej preverite, če je paket popoln in, da ni nobeden izmed sestavnih delov kakorkoli poškodovan. V primeru dvoma, izdelka ne pričnite uporabljati in se posvetujte s prodajalcem.

V paket je vključeno sledeče:

- 1 grelnik za noge MEDISANA s prevleko
- 1 navodilo za uporabo

Pakiranje lahko ponovno uporabite in je primerno za reciklažo. Dele pakiranja zavržite v skladu s pravili. Če Pri pakiranju opazite poškodbe transporta, se nemudoma oglasite pri prodajalcu.



Nevarnost za otroke!

Ne dovolite, da se otroci igrajo s prozorno plastično embalažo. Nevarnost zadušitve!

2.2 Delovanje

Vedno se prepričajte, da med uporabo grelni copati niso prepognjeni. Grelnik za noge morate vedno uporabljati s prevleko. Grelnik za noge vklopite z drsnim stikalom na kontrolni enoti. Nikoli ne uporabljajte štoparice!

Stikalo na 0 = naprava je izklopljena
Stikalo na 1 = nizko izhajanje toplote
Stikalo na 2 = srednje izhajanje toplote
Stikalo na 3 = visoko izhajanje toplote

Ko je stikalo na 1, 2 ali 3, je prižgana indikacijska lučka. Sedaj lahko uživate ob prijetni toploti. Po približno 90 minutah neprekinjene uporabe se grelnik za noge samodejno izklopi. Za ponovni vklop morate stikalo najprej namestiti na 0. Po približno 5 sekundah lahko stikalo ponovno prestavite na 1, 2 ali 3. Z uporabo lahko prenehate kadarkoli tako, da stikalo prestavite nazaj na 0. Ko boste z uporabo prenehali, grelnik za noge izklopite iz električnega omrežja.



OPOZORILO

Med delovanjem se lahko kontrolna enota malce segreje. Zaradi tega kontrolno stikalo med uporabo ne sme biti pokrito ali nameščeno na grelnih copatih.

Med preverjanjem toplote grelnika za noge se ne zanašajte na roke. Roke so toploto manj občutljive kot preostali deli telesa. Temperatura, ki je prijetna rokam je lahko za noge previsoka.

Če pride do napake v delovanju, se indikacijska lučka ugasne, kljub temu, da je izdelek še vklopljen. Po pojavu napake v delovanju morate z uporabo prenehati. V tem primeru vam ne moremo zagotoviti varne uporabe.

3 RAZNO

3.1 ČIŠČENJE in VZDRŽEVANJE

GRELNIK za NOGE

Grelnik za noge skušajte ohraniti čiste saj jih ne smete čistiti. Pred čiščenjem grelnik za noge izklopite iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi. Grelnik za noge lahko čistite z uporabo mehke krtačke. Majhne madeže lahko čistite s krpo ali rahlo vlažno gobico z uporabo nežnega tekočega čistila. Grelnika za noge ne smete zmočiti. Če postane vlažen, ga morate sušiti na zraku. Grelnik za noge shranite v suh prostor in na njem ne odlagajte drugih predmetov.

PREVLEKA (notranjost)

Pred čiščenjem grelnika za noge morate najprej odstraniti notranjo prevleko. Prevleko lahko očistite z uporabo vlažne krpe ali po navodilih na etiketi. Uporabljajte le čistila, ki ne vsebujejo topil. Grelnik za noge ponovno uporabite ko je popolnoma suh.

3.2 RAVNANJE Z IZTROŠENIM IZDELKOM



Ko je naprava iztrošena, jo odstranite na za to določeno mesto, v skladu s predpisi o ravnanju z iztrošenimi električnimi napravami. Embalažo lahko recikliramo ali jo ponovno uporabimo, ostale dele pa oddamo na okolju prijazen način.

Preden napravo odstranite, ji odstranite baterije; baterij ne mečite med gospodinjske odpadke! S celotno iztrošeno napravo ravnajte v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.

3.3 TEHNIČNI PODATKI

Ime in model	: Grelnik za noge MEDISANA FWS
Napetost, frekvenca	: 220 - 240 V , 50 Hz
Grelni učinek	: približno 100 W
Samodejni izklop	: po približno 90 minutah
Dimenzije	: približno 30 x 30 x23 cm
Teža	: približno 580 g
Dolžina kabla	: približno 2,0 m
Številka izdelka	: 60256
EAN številka	: 40 15588 60256 6

Garancijski list

GRELNI COPATI MEDISANA FWS

Proizvajalec:

MEDISANA GmbH
Carl-Schurz-Str. 2
41460 NEUSS, Nemčija
www.medisana.de

Žig, podpis ter sedež prodajalca:

Datum izročitve:

GARANCIJSKI POGOJI

1. Proizvajalec jamči, da ima izdelek predpisane, oz. deklarirane kvalitetne karakteristike in da bo na zahtevo imetnika garancijskega lista, če ga dobavi v garancijskem roku, na lastne stroške odpravil napake in pomanjkljivosti izdelka, ki izhajajo iz izdelka ali pa bo izdelek, ki ima take pomanjkljivosti zamenjal z novim.
2. Garancijski rok začne teči od dneva izročitve, kar dokažete s pravilno izpolnjenim garancijskim listom (žig, podpis ter sedež prodajalca, datum prodaje, serijska številka aparata in izvornim računom).
3. Dajalec garancije zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
4. Garancija velja na območju Slovenije.
5. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
6. Garancija preneha veljati v primerih:
 - če ne upoštevate navodil za uporabo,
 - če popravilo izvrši nepooblaščen oseba,
 - zaradi malomarnega ravnanja s proizvodom,
 - če poškodba nastane zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca.

GARANCIJSKI ROK JE 3 LETA.

Zastopnik za Slovenijo (dajalec garancije):

PROLAT d.o.o., Praproče 9, 8210 Trebnje

T: (07) 30 44 555

F: (07) 30 44 333

info@prolat.si

www.prolat.si

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure; sobota, nedelja, prazniki zaprto

Serviser:

MEDIA-IMPEKS d.o.o.

Kicar 11 g

SI-2250 PTUJ

Tel. +386 599 60 650

Fax: +386 2 796 09 21

Gsm: +386 41 633 636

www.media-impex.com