

PiC Solution Fiziološka raztopina RinoFlux

Kaj je fiziološka raztopina?

Fiziološka raztopina je mešanica natrijevega klorida in vode. Ampula je sterilna, praktična in pripravljena za uporabo. Ker izdelek nima stranskih učinkov, je primerna tudi za dolgotrajnejše shranjevanje in posledično uporabo. Izdelek je na voljo v ampulah v odmerjenih količinah za enkratno uporabo. Zaradi sterilnosti priporočamo, da se tekočina ene ampule porabi naenkrat in takoj po odprtju.

Indikacije

Fiziološka raztopina je namenjena:

- za uporabo za inhaliranje z inhalatorji za vlaženje celotne dihalne poti, za čiščenje nosu in kot pomoč pri izločanju nosnih izcedkov pri odraslih in otrocih.
- za dnevno higieno nosne sluznice, za preprečevanje nalaganja sluzi
- za lažje izločanje sluzi med prehladi
- za čiščenje oči (kot zunanja uporaba)

Navodilo za uporabo pri čiščenju nosu

Odprite ampulo tako, da kapico ampule zasučete (slika 1); glavo nagnite na levo; pri otrocih, otoka poležite na stran tako, da z eno roko podprete glavo (slika 2). stekleničko, napolnjeno s čim več fiziološke raztopine namestite v nosnico in raztopino stiskajte v nosnico. Postopek ponovite v drugi nosnici. Počakajte nekaj minut, da prične raztopina delovati. Z robčkom obrišite izcedek. Pri otrocih, otrokovo glavo privzdignite in nato očistite izcedek z robčkom ali nosnim aspiratorjem (slika 3). Uporabite po potrebi ali po nasvetu osebnega zdravnika.

Navodilo za uporabo pri uporabi z inhalatorjem

Odprite ampulo tako, da kapico ampule zasučete (slika 1); odprite posodico za zdravila (del inhalatorja; slika 4); natočite željeno količino fiziološke raztopine (slika 5); zaprite posodico za zdravila in namestite še ostale dele inhalatorja; uporabite po potrebi ali po nasvetu osebnega zdravnika.

Sestavine: natrijev klorid 0,9%, sterilna voda do 100ml

Prodajne enote:

20 x 2ml ampule (REF 02 039101 020 300)
20 x 5ml ampule (REF 02 039101 050 100)
10 x 10ml ampule (REF 02 039101 100 100)



Opozorila

Za zunanjo uporabo; ni za injiciranje. Shranjevati v hladnem, suhem prostoru stran od sončne svetlobe in virov toplote. Sterilnost zagotovljena le v primeru nepoškodovane in neuporabljene embalaže. Navodila za uporabo shranite dokler izdelka ne uporabite.

Sterilno. Za enkratno uporabo. Embalažo reciklirati. Rev. 01/2019.

Proizvajalec: Pikdare S.p.A., 22070 Casnate con Bernate, Italija