

Sterilna fiziološka raztopina PIC

Hranite pri sobni temperaturi.

Zavarujte pred izvori toplote ali svetlobe.

Prosimo, shranite navodila za uporabo, dokler ne porabite celotne količine raztopine.

Sterilna fiziološka raztopina za nos, pakirana v vialah po odmerkih, posebej prilagojenih za dojenčke in otroke.

Fiziološka raztopina PIC fiziološko očisti nosno votlino in ohranja naravno ravnotežje sluznice; pospešuje izločanje nosnih izcedkov in obnovi naravne pogoje za zdravo in pravilno dihanje.

Uporaba pri dnevni nosni higieni pomaga preprečiti in rešiti veliko problemov zaradi neprehodnih nosnic pri dojenčkih.

Dejstvo je, da je pravilna nosna higiena nujna za lažje hranjenje dojenčka.

Uporaba fiziološke raztopine PIC:

- za dnevno higieno nosne sluznice in za preprečevanje nastanka strdkov nosnih izcedkov zaradi slabšega izločanja,
- za lažšanje odvajanja večjih količin nosnih izcedkov v primeru prehlada, za ohranjanje vlažnosti nosne sluznice v vseh škodljivih pogojih v okolju (ogrevani prostori, suh zrak, klimatizirani prostori,...),
- Pri aerosolni terapiji ohranja nosne izcedke tekoče.

Navodila za uporabo:

1. Odprite sterilno vialo za en odmerek z zasukom pokrova (slika 1).
2. Dojenčka položite na stran, glavico podprite z roko (slika 2), previdno namestite odprtino viala pred nosnico in obilno izperite nosno votlino z raztopino. Enako ponovite postopek pri drugi nosnici.
3. Počakajte nekaj minut, da raztopina začne delovati in nato odstranite nosne izcedke z nosnim aspiratorjem ali z robcem (slika 3).
4. Ponovite 1-2 krat na dan ali v skladu z navodili zdravnika.

Sestava:

Natrijev klorid 0,9%, sterilna voda do 100 ml.

Prodajno pakiranje:

10 vial po 2,0 ml,

10 vial po 10,0 ml

20 vial po 5,0ml

Opozorili:

Ni injekcijsko vbrizgavanje. Samo za zunanjo uporabo.

Proizvod je pakiran v vialah za en odmerek. Zato priporočamo, da vsako vialo uporabite samo enkrat in s tem zagotovite sterilnost.